

Gips- en verbandscharen

Reinigings- en onderhoudsadvies

Algemeen

Dit advies geldt zowel voor de Gipsschaar Hercules, als voor andere type gips- en verbandscharen. Bij intensief gebruik van een schaar adviseert Medex Instrumenten Service één gebruiker per schaar. Dit heeft te maken met de verschillende knipwijze en het krachterspel die per persoon varieert en daarbij de functionaliteit van de schaar beïnvloed.

Dagelijks onderhoud

Stappenplan:

1. Reiniging
2. Droging
3. Smering

Reiniging

Voor behoud van de schaar adviseert Medex de schaar dagelijks te reinigen. Dit kan op verschillende manieren:

Ultrasoon:

1. Bereid met gebruikmaking van leidingwater een reinigungsoplossing volgens de instructies, verdunningsaanbevelingen en temperaturen van de fabrikant in een ultrasoonbad van de juiste grootte.
2. Plaats de schaar geopend in de korf, dompel deze volledig onder in het reinigungsmiddel en ultrasoneer deze gedurende minimaal 10 minuten (maximaal 30 minuten).

Note: Het is van belang om de schaar geopend te reinigen om te voorkomen dat de snijvlakken beschadigen wanneer zij elkaar raken tijdens het ultrasoneren.

Handmatig:

1. Spoel het instrumentarium minimaal 3 minuten lang onder stromend lauw leidingwater.
2. Borstel randen, kieren en gewrichten zorgvuldig. Beweeg de beweegbare gedeeltes tijdens het borstelen. Gebruik hiervoor zachte borstels of speciale sponzen.

Note: Gebruik nooit harde borstels of sponzen die het metaal kunnen krassen om corrosie te voorkomen.

Reinigungsmiddelen:

Laat uw scharen nooit langer dan 30 minuten weken in reinigungsmiddelen zoals bijv. Ecoclean, Multisol of vergelijkbare reinigungsmiddelen. Deze middelen kunnen de passiveringslaag aantasten wat kan leiden tot corrosie.

Droging

Het is van essentieel belang dat de schaar na reiniging goed wordt gedroogd. Voorkeur gaat uit naar droging middels perslucht, maar gebruik van een droge doek volstaat ook. Vooral het scharnierende deel verdient aandacht.

Smering

Na droging moeten de scharnieren worden gesmeerd met instrumenten olie. Medex adviseert om de olie over de schaar te verdelen om hechting van het gips aan de schaar te verminderen.

Reinigungs hulpmiddelen

Uiteraard voorziet Medex u graag van de juiste borstels, sponzen en onderhoudsmiddelen. Neem voor meer informatie en advies contact op met een van onze medewerkers.

Periodiek Onderhoud

Door te lang met een botte schaar te werken is de kans groot dat de schaar schade oploopt en reparatie nauwelijks of niet meer mogelijk is. Daarom adviseert Medex bij intensief gebruik een schaar 3 keer per jaar aan te bieden voor groot onderhoud. Dit betreft technisch onderhoud waarbij de schaar gedemonteerd wordt gerepareerd en gereinigd.

Correctief Onderhoud

Bekijk regelmatig de staat waarin uw schaar verkeert. Bied uw schaar aan ter reparatie indien u duidelijke tekenen van overmatige slijtage of beschadiging constateert.

Onderhoudsadvies op MAAT

Neem gerust contact op met een van onze medewerkers voor reinigungs- en onderhoudsadvies op maat, afgestemd op de beschikbare middelen binnen uw organisatie. Uiteraard behoren onderhoudsinstructie en –advies op locatie tevens tot de mogelijkheden.